

DT EQUATOR
EASY
Fix

proteza fixă
fără suruburi
de la Rhein83



De ce EASY FIX?


- Absența șuruburilor protetice în proiectele Full Arch
- Etanșeitate protetică de nivelul unui sistem T-Base standard
- Deblocarea protezei atraumatică datorită cheii speciale
- Poziționare simplă și sigură până la 60°
- Igienă periodică simplificată

RHEIN83

Principalele avantaje ale sistemului Easy Fix


► 1 **Deblocare simplă a protezei** ✓

Pentru a debloca proteza Easy Fix, trebuie lăsat un singur punct de acces pentru a introduce instrumentul special de deblocare. Prin înșurubarea instrumentului în bontul T-base Easy Fix, proteza se va ridica, permițând o desprindere atraumatică.

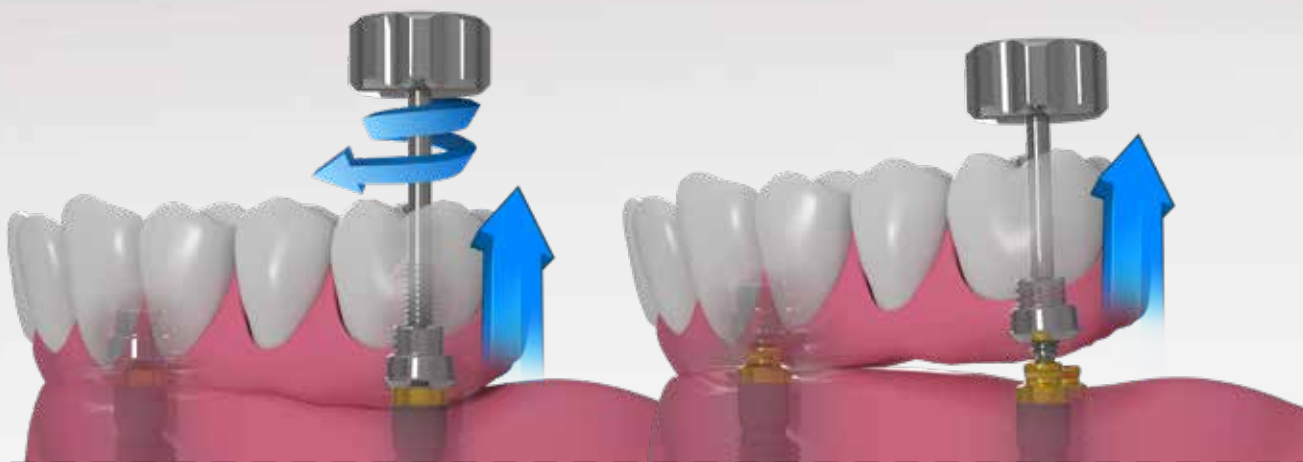

► 2 **Tu alegi unde plasezi punctul de acces pentru eliberare** ✓

Folosind sistemul Easy Fix, ai opțiunea de a lăsa un singur punct de acces pentru eliberare în cea mai convenabilă locație din punct de vedere estetic și funcțional pentru proiectul tău protetic.

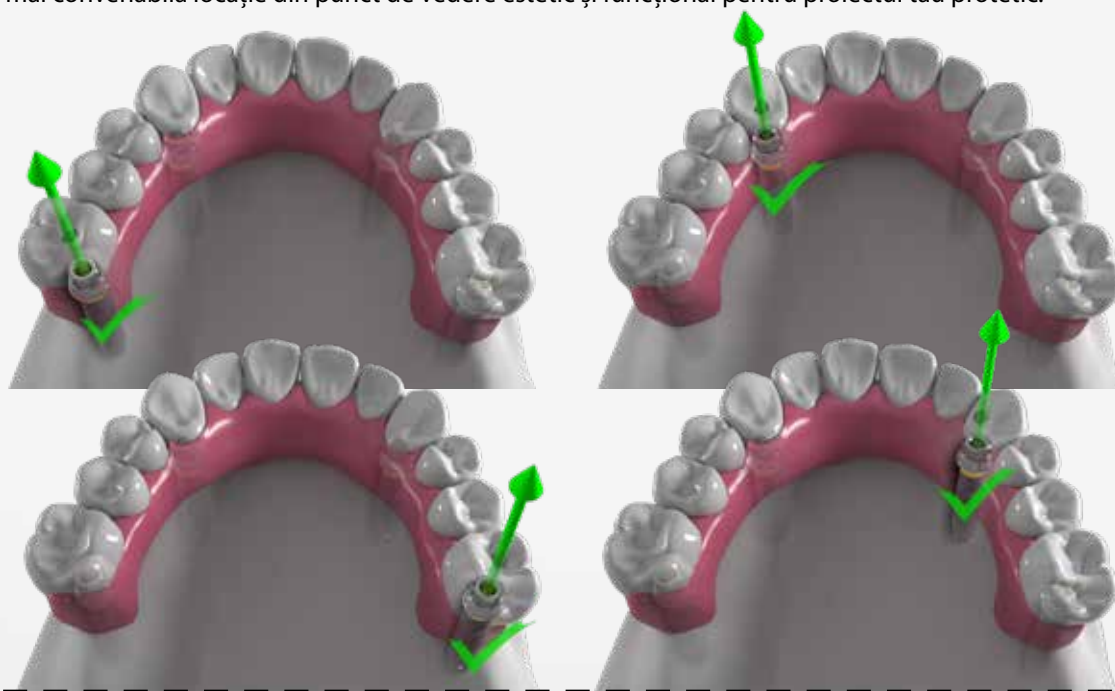

► 3 **Gestionarea forței de retenție a protezei** ✓

Datorită celor trei forțe de retenție diferite ale inelelor Seeger, este posibilă gestionarea retenției corecte a protezei în funcție de numărul de implanturi.

Șurub opțional

Se utilizează în orificiul de eliberare

Inserator Seeger

Inelul Seeger se introduce în interiorul bontului T-base Easy Fix cu ajutorul instrumentului special de inserție. Deschiderea inelului Seeger va corespunde porțiunii „extragrade” a bontului T-base Easy Fix.

Seeger cu retenție "Strong"

Seeger cu retenție "Medium"

Seeger cu retenție "Soft"


Seeger de laborator



Realizarea structurii Easy Fix: protocol de lucru analogic




Bonturi Ot Equator plasate în gura pacientului.

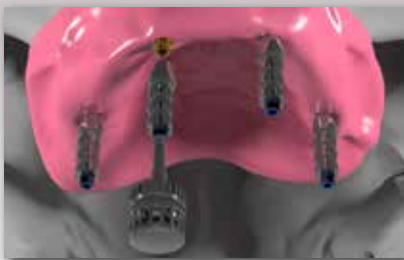


Înșurubarea transferurilor de titan pe atașamente Ot Equator pentru a continua cu amprentarea.




Model de lucru din gips cu analogi de laborator.

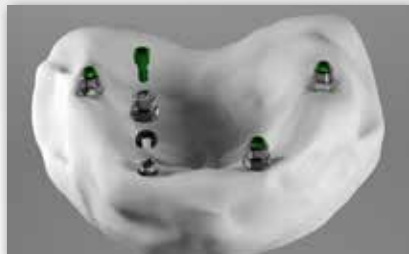

Model din gips cu bontul T-base Easy Fix cu șuruburile de fixare și inelele Seeger de laborator.

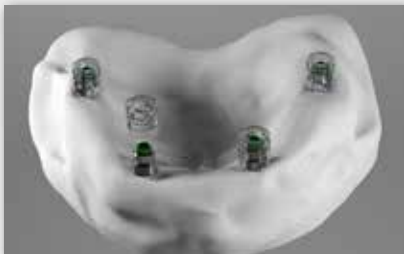

Plasarea manșoanelor turnabile pe bonturile T-base Easy Fix.

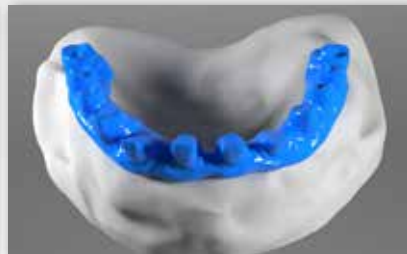

Proiectarea unei structuri.



Cimentarea bonturilor T-base Easy Fix în interiorul structurii metalice cu ciment Ot Cem.



Structura metalică cu bontul T-base cimentat pe poziție.



Lucrare finalizată cu punctul de acces pentru cheia de deblocare în poziția 16*.

Realizarea structurii Easy Fix: protocol de lucru digital




Atașamente Ot Equator plasate în gura pacientului.



Înșurubarea Scan Abutment-ului pe Ot Equator pentru a continua cu amprentarea digitală cu scanner intraoral.



Model de lucru din gips cu analogi de laborator.

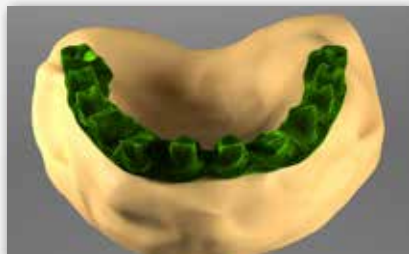

Modelarea structurii cu biblioteci digitale.



Cimentarea bonturilor T-base Easy Fix în interiorul structurii frezată, cu ciment Ot Cem.



Structura frezată cu bonturile T-base cimentate în poziție.



Bonturile T-base EasyFix în poziție cu structura finisată.



Lucrare finalizată cu punct de acces pentru cheia de deblocare în poziția 16*.

Ot EQUATOR EASY Fix



Ot Equator abutment

Ref. 030



Easy Fix Kit
T-Base h 4mm

Ref. KMSRF



Easy Fix Kit
T-Base h 6mm

Ref. KMASRF



Easy Fix Kit
T-Base h 9mm

Ref. KMLSRF



Easy Fix Seeger Kit

Ref. KSEF



Ratchet torque
control device

Ref. 760CRD-US



"Strong" Seeger

Ref. KSST



"Medium" Seeger

Ref. KSM



"Soft" Seeger

Ref. KSSO



"Laboratory" Seeger

Ref. KSL



Ot Equator screw driver

Ref. 776CGC



Ot Equator Long screw driver

Ref. 777CGL



Unlocking tool

Ref. 761EEF



Long Unlocking tool

Ref. 761ELEF



Insertion tool

Ref. 491SEIM



Easy Fix T-Base h 4mm

Ref. RMEF



Easy Fix T-Base h 6mm

Ref. RMAEF



Easy Fix T-Base h 9mm

Ref. RMLEF



Castable sleeve h 4mm

Ref. 240GCEF



Castable sleeve h 6mm

Ref. 240GCAEF



Castable sleeve h 9mm

Ref. 240GCLEF



Sealing screw

Ref. 149TEF



Locking screw

Ref. 149VEF



Space screw

Ref. 239VSEF



Ot Equator Analogue ø4mm

Ref. 144AE



Digital analogue for
printed models

Ref. 144AVC4



Scan Abutment

Ref. 145SAE




Ot Equator Transfer

Ref. 144TLE




Composite cement

Ref. OC

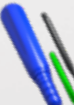

Inserter, tester
and Seeger extractor

Ref. 491EEF

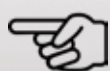

Scanează pentru
a afla mai multe!

RHEIN83

Via E.Zago 10/abc 40128 Bologna (Italy) Tel. +39 051244510
www.rhein83.com • marketing@rhein83.it